


Alpha højdejusterbar armstøtte

- hverdagskomfort på rette niveau

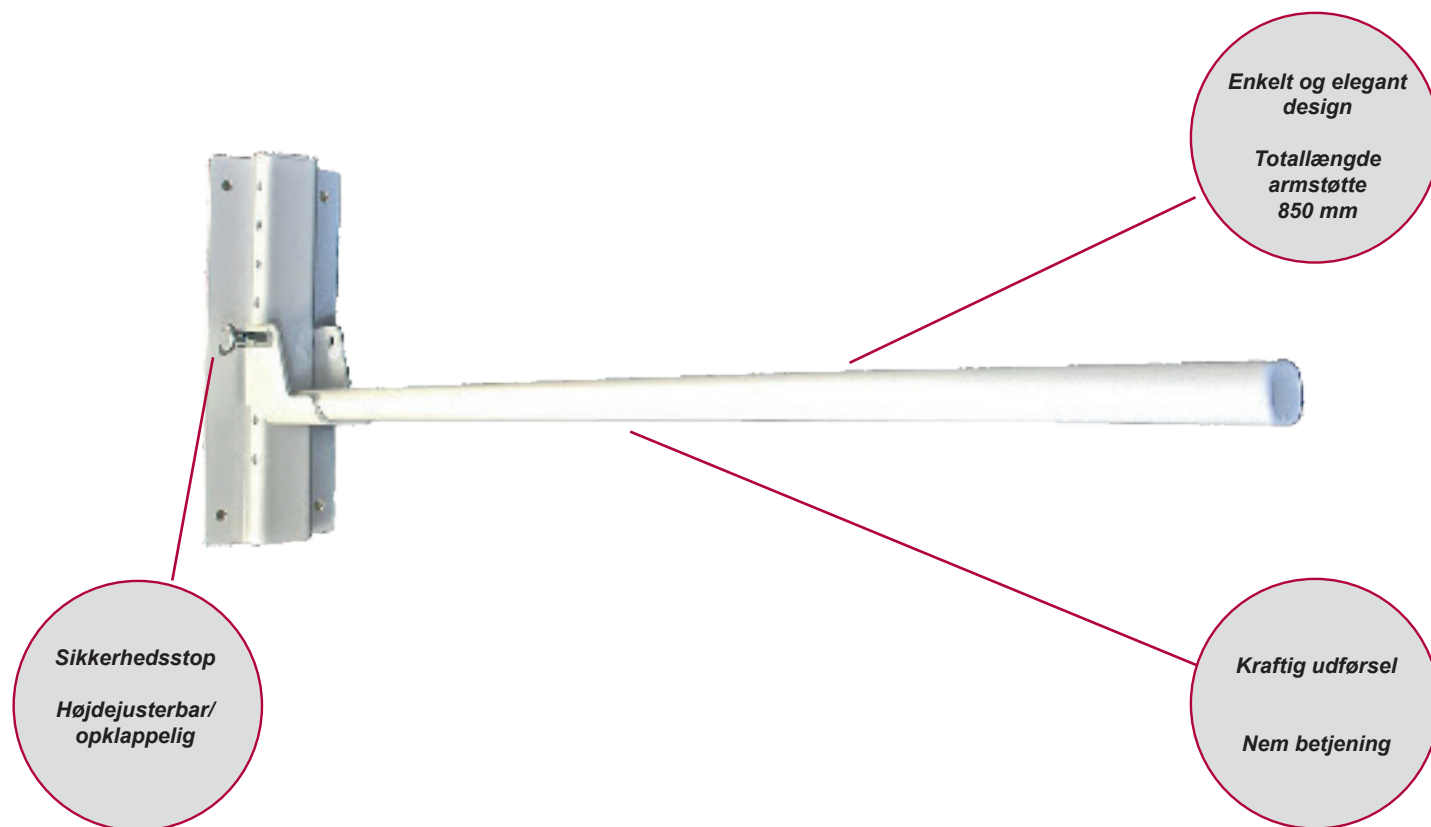

ALPHA - Højdejusterbar og opklappelig armstøtte med sikkerhedsstop

Model: 6050

Højdejusterbar og opklappelig armstøtte med låsbar positionsbolt til vægmontering. Positionsbolten anvendes som sikkerhedsstop i opklappet position. Dette giver stor sikkerhed for brugere/personale.

Alpha Care's højdejusterbar armstøtte egner sig til brugere, som har behov for ekstra støtte ved toiletbesøg.

Anvendelse:

Handicapboliger, plejeboliger, hospitaler, klinikker, institutioner, restauranter, kontorbyggerier samt private hjem. Armstøtten kan udløses ved at rykke ud i den fjederbelastede positionsbolt placeret på siden af armstøtten, hvorefter armstøtten kan nedklappes. Ønskes positionen fastlåst skal fjederknappen på positionsbolten drejes, så den går i indgreb, hvorefter den er fastlåst.

Specifikationer:

Monteringshøjde over færdigt gulvniveau:	800 mm (overkant arm)
Totallængde fra væg:	850 mm
Justeringshøjde:	200 mm
Max. belastning:	335 kg. (Målt 300 mm fra yderpunkt arm)
Udførelse:	Hvid pulverlakering (RAL 9016 - glans 80)

Lakerede overflader udført i.h.t. klasse 4, dvs. ved evt. lakfejl opereres med en betragtningsafstand på 3 meter.

01/24

Montering af armstøtte:

Vi anbefaler at armstøtten monteres i en højde af 80 cm over færdigt gulvniveau (målt til overkant arm).

Sæt underkanten af vægbeslaget 67 cm over færdigt gulv, og opmærk de 6 skruehuller til vægbeslaget på væggen. Herefter fastgøres armstøtten på væggen ved hjælp af de medfølgende montageskruer.

I denne position er armen placeret i midterpositionen på det på væggen fastmonterede vægbeslag.

Armstøtten kan højdeindstilles ved brug af værktøj i 3 positioner i opadgående retning eller 3 positioner i nedadgående retning (+/-100 mm). Det vil sige at armstøtten kan justeres fra 70 cm - 90 cm.

BEMÆRK:

Ved montering på gibs- eller trævægge skal anvendes andre typer monteringskruer eller forstærket befæstigelse på væggens bagside. Kontakt din skrue-leverandør.


Positionsboltens funktion:

Positionsbolten er fabriksmonteret på den ene side af armstøtten.

Positionsbolten skal sikre, at armstøtten kan fastlåses, og denne skal altid være i indgreb når armstøtten benyttes. Når fjederen er slået til, fungerer den som et sikkerhedsstop.

BEMÆRK:

Hvis positionsbolten flyttes til modsatte side af armstøtten bør der males eller bruges en gennemsigtig lakforsegler for at undgå korrosion.

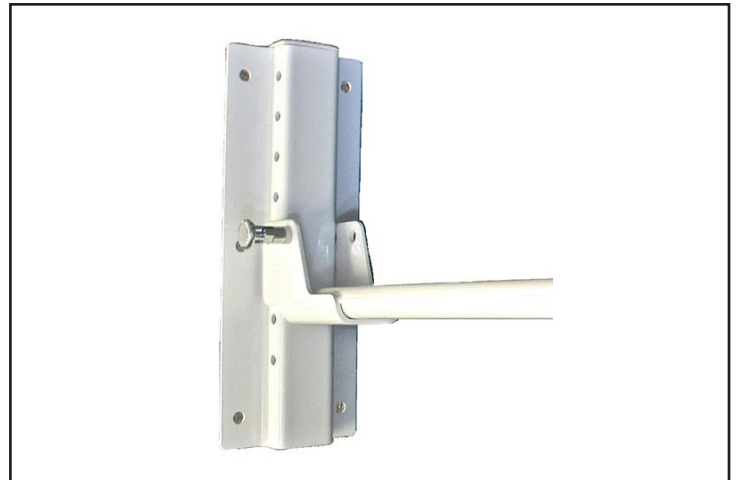

Rengøring og vedligeholdelse:

Armstøtten skal jævnligt rengøres/aftørres med et **ikke** slibende rengøringsmiddel.

Ved behov for afkalkning af overflader kan dette ske ved anvendelse af en mild opløsning af afkalkningsmiddel.

Tilbehør:

Papirholder kan leveres som ekstra tilbehør og denne skal monteres på undersiden af armstøtten på følgende måde:

Demontér de to skruer, der er monteret på armstøttens underside.

Monter papirholderen og fastspænd skruerne med en unbrako-nøgle.

Husk at vende papirholderen fremad.

