

Alpha højdejusterbar armstøtte med ben

- hverdagskomfort på rette niveau



Enkelt og elegant design

Totallængde armstøtte 850 mm

Sikkerhedsstop
Højdejusterbar/
opklappelig

Kraftig udførsel med støtteben

Nem betjening

ALPHA - Højdejusterbar og opklappelig armstøtte med støtteben og sikkerhedsstop

Model: 6070

Højdejusterbar og opklappelig armstøtte med støtteben og låsbar positionsbolt til vægmontering. Positionsbolten anvendes som sikkerhedsstop i opklappet position. Dette giver stor sikkerhed for brugere/personale. Alpha Care's højdejusterbar armstøtte egner sig til brugere, som har behov for ekstra støtte ved toiletbesøg.

Anvendelse:

Handicapboliger, plejeboliger, hospitaler, klinikker, institutioner, restauranter, kontorbyggerier samt private hjem. Armstøtten kan udløses ved at rykke ud i den fjederbelastede positionsbolt placeret på siden af armstøtten, hvorefter armstøtten kan nedklappes. Ønskes positionen fastlåst skal fjederknappen på positionsbolten drejes, så den går i indgreb, hvorefter den er fastlåst.

Specifikationer:

Monteringshøjde over færdigt gulvniveau:	800 mm (overkant arm)
Totallængde fra væg:	850 mm
Justeringshøjde:	140 mm
Max. belastning:	335 kg. (Målt 300 mm fra yderpunkt arm)
Udførsel:	Hvid pulverlakering (RAL 9016 - glans 80)

Lakerede overflader udført i.h.t. klasse 4, dvs. ved evt. lakfejl opereres med en betragtningsafstand på 3 meter.

06/19

Montering af armstøtte:

Vi anbefaler at armstøtten monteres i en højde af 80 cm over færdigt gulvniveau (målt til overkant arm).

Ved levering er støttearmen monteret på vægbeslaget således at den kan højdejusteres som følger: ca. 70 mm nedad og 70 mm opad. Armstøtten kan justeres fra 73 cm - 87 cm. (ca. 140 mm)

Sæt underkanten af vægbeslaget 63 cm over færdigt gulv, og opmærk de 6 skruehuller til vægbeslaget på væggen. Herefter fastgøres armstøtten på væggen ved hjælp af de medfølgende montageskruer.

BEMÆRK:

Ved montering på gips- eller trævægge skal anvendes andre typer monteringsskruer eller forstærket befæstigelse på væggens bagside. Kontakt din skrue-leverandør.

Positionsboltens funktion:

Positionsbolten er fabriksmonteret på den ene side af armstøtten.

Positionsbolten skal sikre, at armstøtten kan fastlåses, og denne skal altid være i indgreb når armstøtten benyttes. Når fjederen er slået til, fungerer den som et sikkerhedsstop.

BEMÆRK:

Hvis positionsbolten flyttes til modsatte af side armstøtten bør der males eller bruges en gennemsigtig lakforsegler for at undgå korrosion.



Rengøring og vedligeholdelse:

Armstøtten skal jævnligt rengøres/aftørres med et **ikke** slibende rengøringsmiddel.

Ved behov for afkalkning af overflader kan dette ske ved anvendelse af en mild opløsning af afkalkningsmiddel.

Tilbehør:

Papirholder kan leveres som ekstra tilbehør og denne skal monteres på undersiden af armstøtten på følgende måde:

Demonter de to skruer, der er monteret på armstøttens underside.

Monter papirholderen og fastspænd skruerne med en unbrako-nøgle.

Husk at vende papirholderen fremad.

