


Alpha højdejusterbar armstøtte

- hverdagskomfort på rette niveau

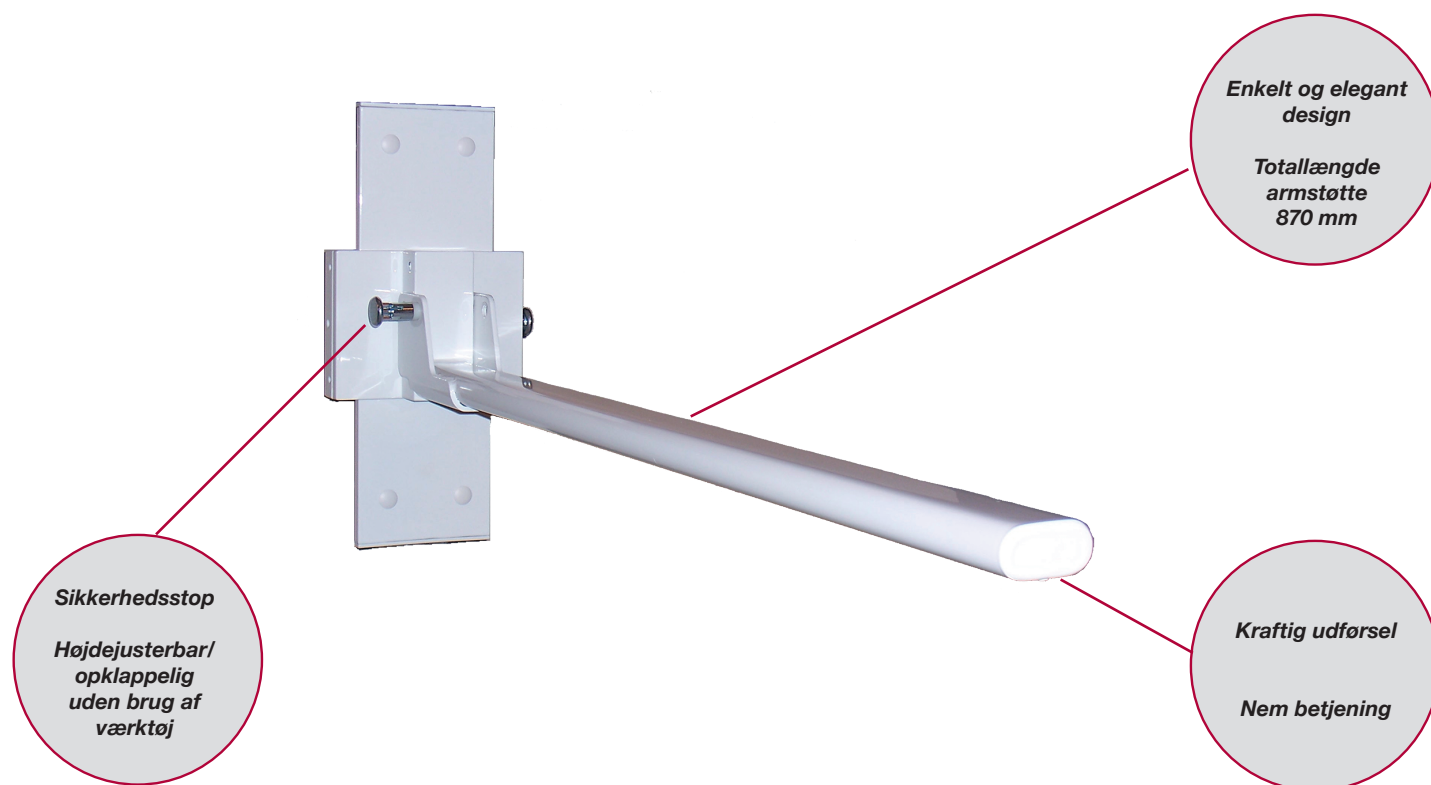

ALPHA - Højdejusterbar og opklappelig armstøtte uden brug af værktøj

Model: 6080

Højdejusterbar og opklappelig armstøtte med låsbare positionsbolte til vægmontering. Positionsboltene anvendes hhv. som sikkerhedsstop i opklappet position samt til højderegulering af armstøtten. Dette giver stor fleksibilitet og betjeningsvenlighed for brugere og personale. Alpha Care's højdejusterbar armstøtte egner sig til brugere, som har behov for ekstra støtte ved toiletbesøg.

Anvendelse:

Handicapboliger, plejeboliger, hospitaler, klinikker, institutioner, restauranter, kontorbyggerier samt private hjem. Armstøtten kan op-/nedklappes ved at rykke ud i den fjederbelastede positionsbolt placeret på siden af armstøtten. Ønskes armstøtten fastlåst skal fjederknappen på positionsbolten drejes, så den går i indgreb. Armstøtten kan højdejusteres ved at rykke ud i positionsbolt på den modsatte side af vægbeslaget.

Specifikationer:

Monteringshøjde over færdigt gulvniveau:	800 mm (overkant arm)
Totallængde fra væg:	870 mm
Justeringshøjde:	210 mm (+ - 105 mm)
Max. belastning:	335 kg. (Målt 300 mm fra yderpunkt arm)
Udførsel:	Hvid pulverlakering (RAL 9016 - glans 80)

Lakerede overflader udført i.h.t. klasse 4, dvs. ved evt. lakfejl opereres med en betragtningsafstand på 3 meter.

06/19

Montering af armstøtte:

Vi anbefaler at armstøtten monteres i en højde af 80 cm over færdigt gulvniveau (målt til overkant arm), når vognen er placeret i midterposition på vægbeslaget.

Det vil sige at det midterste hulpar på fronten af vægbeslaget skal placeres/bores i en højde af 83 cm over færdigt gulv, så vil armen komme til at sidde i den anbefalede højde.

Opmærk de 6 skruehuller til vægbeslaget på væggen. Herefter fastgøres armstøtten på væggen ved hjælp af de medfølgende montageskruer og dækpropperne eftermonteres.

Armstøtten kan indstilles i 4 positioner i opadgående retning eller 4 positioner i nedadgående retning (+/-105 mm). Det vil sige at armstøtten kan justeres fra 70 cm - 90 cm.

BEMÆRK:

Ved montering på gips- eller trævægge skal anvendes andre typer monteringsskruer eller forstærket befæstigelse på væggens bagside. Kontakt din skrue-leverandør.


Positionsboltens funktion:

På vægbeslagets vogn er der placeret en fjederbelastet positionsbolt. Denne positionsbolt bruges til højdejustering af armstøtten (uden brug af værktøj).

På armstøtten er der placeret en fjederbelastet positionsbolt, som skal sikre, at armstøtten kan fastlåses, når armen er slået op. Når fjederen er i indgreb, fungerer den som et sikkerhedsstop.

BEMÆRK:

Hvis positionsbolten flyttes til modsatte af armstøtten bør der males eller bruges en gennemsigtig lakforsegler for at undgå korrosion.

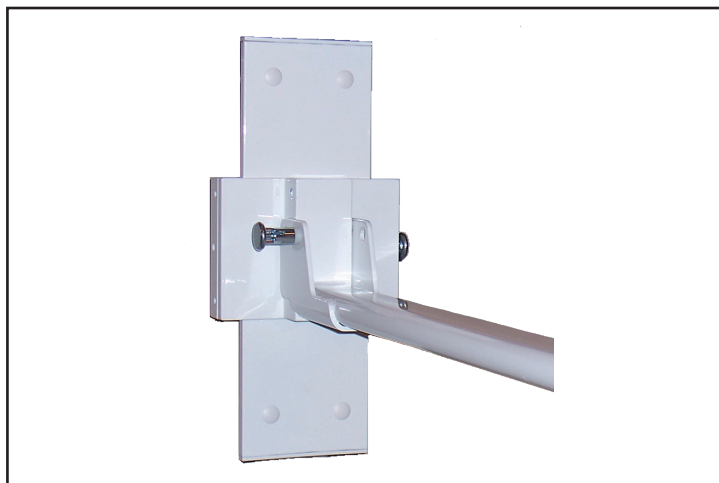

Rengøring og vedligeholdelse:

Armstøtten skal jævnligt rengøres/aftørres med et **ikke** slibende rengøringsmiddel.

Ved behov for afkalkning af overflader kan dette ske ved anvendelse af en mild opløsning af afkalkningsmiddel.

Tilbehør:

Papirholder kan leveres som ekstra tilbehør og denne skal monteres på undersiden af armstøtten på følgende måde:

Demonter de to skruer, der er monteret på armstøttens underside.

Monter papirholderen og fastspænd skruerne med en unbrako-nøgle.

Husk at vende papirholderen fremad.

