


Alpha højdejusterbar armstøtte på vægskinne

- hverdagskomfort på rette niveau

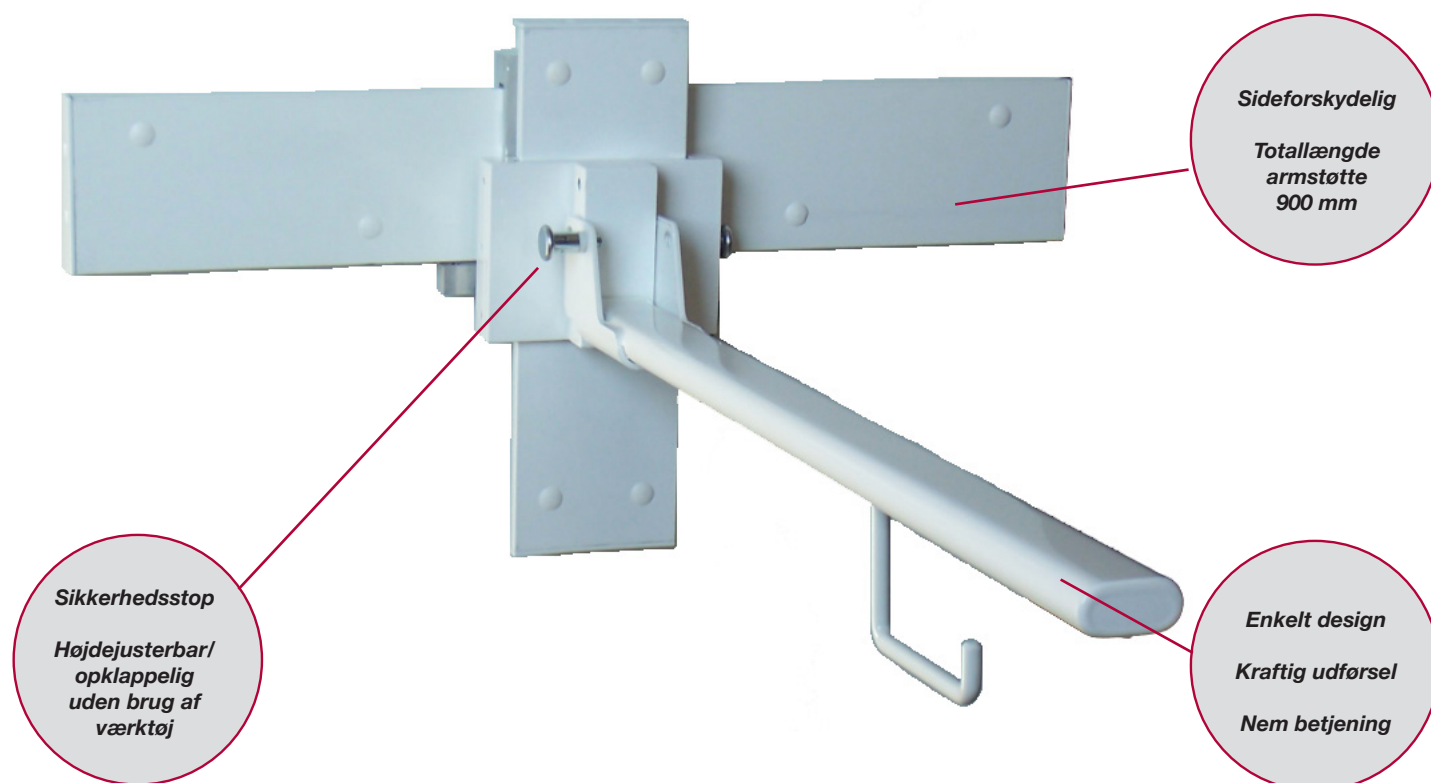

ALPHA - Højdejusterbar og sideforskydelig armstøtte uden brug af værktøj

Model: 6090

Højdejusterbar og opklappelig armstøtte til montering på vægskinne med låsbare positionsbolte. Positionsboltene anvendes hhv. som sikkerhedsstop i opklappet position samt til højderegulering af armstøtten. Dette giver stor fleksibilitet og betjeningsvenlighed for brugere og personale. Alpha Care's højdejusterbar armstøtte egner sig til brugere, som har behov for ekstra støtte ved toiletbesøg.

Anvendelse:

Handicapboliger, plejeboliger, hospitaler, klinikker, institutioner, restauranter, kontorbyggerier samt private hjem. Armstøtten kan op-/nedklappes ved at rykke ud i den fjederbelastede positionsbolt placeret på siden af armstøtten. Ønskes armstøtten fastlåst skal fjederknappen på positionsbolten drejes, så den går i indgreb. Armstøtten kan højdejusteres ved at rykke ud i positionsbolt på den modsatte side af vægbeslaget og sideforskydes via drejegrebet på vognens underside. (Huak at fastlåse dette igen).

Specifikationer:

Monteringshøjde over færdigt gulvniveau:	800 mm (overkant arm)
Totallængde fra væg:	900 mm
Justeringshøjde:	230 mm
Max. belastning:	335 kg. (Målt 300 mm fra yderpunkt arm)
Udførsel:	Hvid pulverlakering (RAL 9016 - glans 80)

Lakerede overflader udført i.h.t. klasse 4, dvs. ved evt. lakfejl opereres med en betragtningsafstand på 3 meter.

06/19

Montering af vægskinne / armstøtte:

Vi anbefaler at armstøtten monteres i en højde af 80 cm over færdigt gulvniveau (målt til overkant arm), når vognen er placeret i midterposition på vægbeslaget.



Opmærk/monter underkanten af vægskinnen i en højde af 85 cm over færdigt gulv med de medfølgende skruer og vægplugs, så vil armstøtten komme til at sidde i den anbefalede højde.

Armstøtten er ved levering færdigmonteret, og skydes ind over vægskinnen. Herefter fastgøres de 2 endeplader på vægskinnen og befæstigelseshullerne dækkes med de medfølgende dækpropper.

Armstøtten kan indstilles i 4 positioner i opadgående retning eller 4 positioner i nedadgående retning. Det vil sige at armstøtten kan justeres fra 69 cm - 92 cm.

BEMÆRK: Ved montering på gips- eller trævægge skal anvendes andre typer monteringskrue eller forstærket befæstigelse på væggens bagside. Kontakt din skru-leverandør.


Justering af støttehjul:

Såfremt det er nødvendigt at justere støttehjulet på armstøttens bagside på grund af ujævnheder i vægmaterialet kan dette gøres ved hjælp af afstandsskiver.

Demontere/monter færre eller flere afstandsskiver for at tilpasse afstanden til væggen. Ekstra afstandsskiver medfølger.

Vi anbefaler at armstøtten monteres i midterposition på beslaget. Armstøtten vil da sidde i en højde af 80 cm over færdigt gulvniveau (målt til overkant arm) som er anbefalede højde for armstøtter.

Foto viser støttehjul på bagsiden af armstøtten

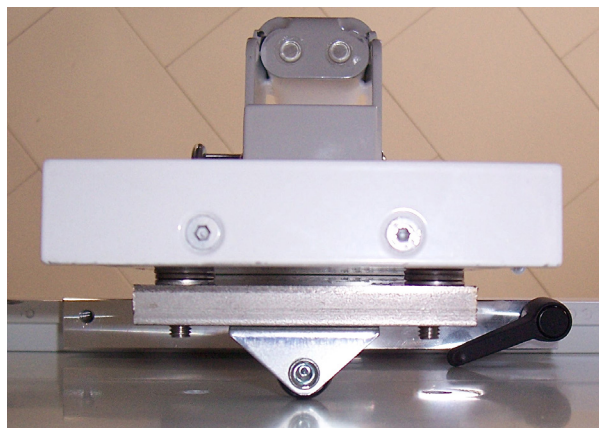

Rengøring og vedligeholdelse:

Armstøtten skal jævnligt rengøres/aftørres med et **ikke** slibende rengøringsmiddel.

Ved behov for afkalkning af overflader kan dette ske ved anvendelse af en mild opløsning af afkalkningsmiddel.

Tilbehør:

Papirholder kan leveres som ekstra tilbehør og denne skal monteres på undersiden af armstøtten på følgende måde:

Demonter de to skruer, der er monteret på armstøttens underside.

Monter papirholderen og fastspænd skruerne med en unbrako-nøgle.

Husk at vende papirholderen fremad.



Toiletpapirholder
Model: 6006

Vægskinner kan leveres fra 600 - 3600 mm

Standard længder:

Model 8109 = 900 mm

Model 8112 = 1200 mm

Model 8115 = 1500 mm

Model 8118 = 1800 mm